



Physiotecnica

производство водолечебного оборудования

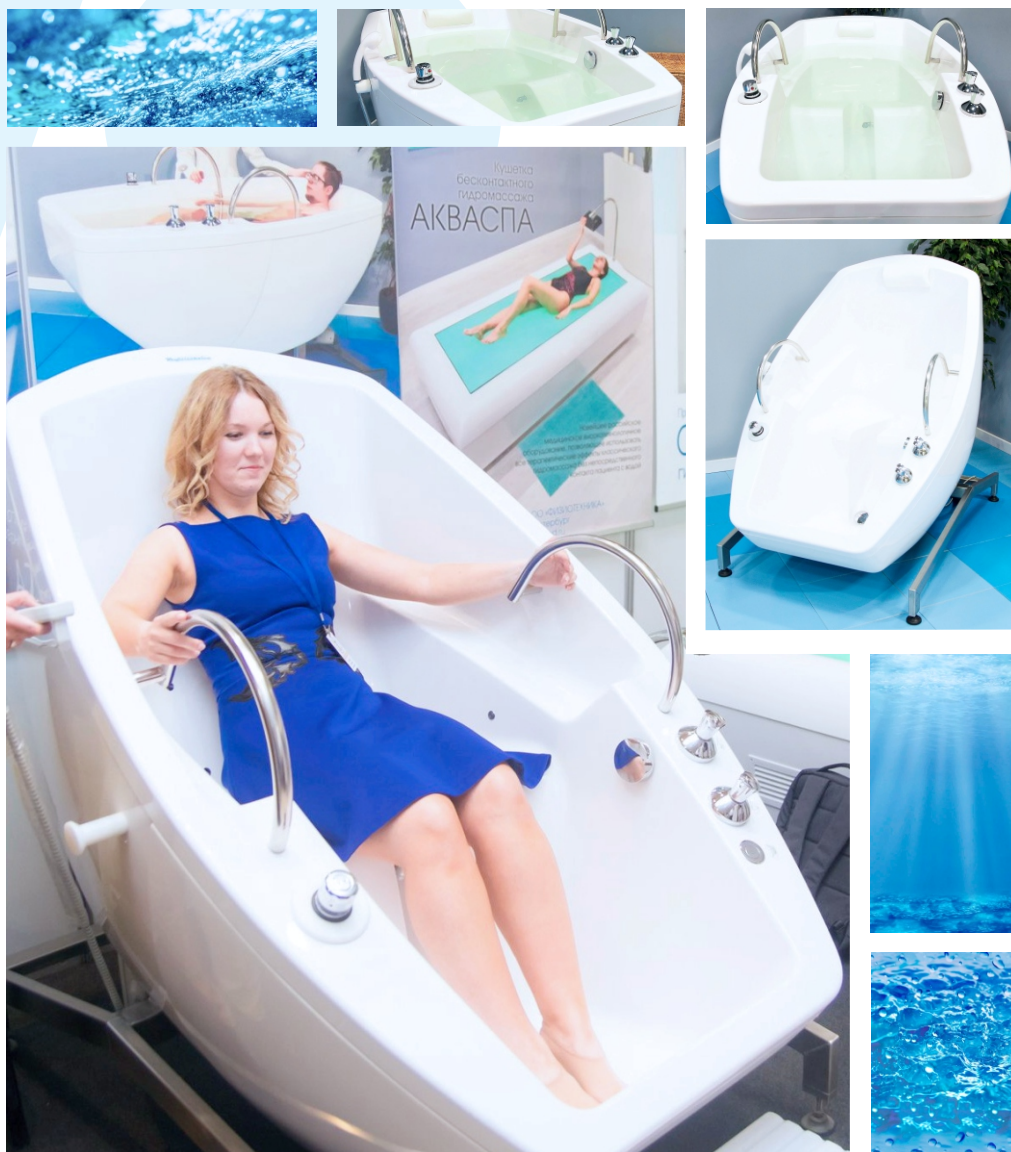

ВАННА ВОДОЛЕЧЕБНАЯ «НЕМАН»

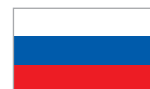

РАЗРАБОТАНО И
ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ
В РОССИИ



Ванна водолечебная НЕМАН

Габаритные размеры	1720×1060×1270 мм
Полезный объем	250 л
Масса	90 кг

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОДОЛЕЧЕБНАЯ ВАННА «НЕМАН» С ФУНКЦИЕЙ НАКЛОНА ДЛЯ УДОБНОГО ВХОДА И ВЫХОДА ПАЦИЕНТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕСНОЙ И СЛАБО МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ.

ЗА СЧЕТ ОРИГИНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА НАКЛОНА ЛОЖА ВАННА МОЖЕТ БЫТЬ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАНА ПРИ ОТПУСКЕ ПРОЦЕДУР ПАЦИЕНТАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ИНВАЛИДАМИ, БОЛЬНЫМИ ДЦП.



Особенности:

Ванна «Неман» подходит для проведения широкого спектра гидротерапевтических процедур за счет возможных дополнительных опций (аэромассаж, хромотерапия) и оригинальной конструкции лежа с изменяемым углом наклона.

Форма лежа в виде шезлонга позволяет достичь максимального комфорта для пациента, делает процедуру безопасной.

Наличие встроенного аккумулятора обеспечивает безопасность завершения процедуры в случае исчезновения электропитания в учреждении.

Корпус ванны выполнен из высокопрочного стеклопластика, устойчивого к агрессивным средам, в том числе высокоминерализованным водам.

Удобная и понятная панель управления позволяет медицинскому персоналу легко контролировать режимы работы ванны и обеспечивает безопасность в процессе эксплуатации.

Рама ванны полностью выполнена из нержавеющей стали.



Базовая комплектация:

- ▶ Ванна с функцией наклона лежа
- ▶ Душ ручной для обмыва ванны (лейка+шланг)

Дополнительно:

- ▶ система аэромассажа (18 аэрофорсунок)
- ▶ система WaterLight, (14 светодиодов)
- ▶ кран для минеральной воды
- ▶ выбор нестандартного цвета по палитре RAL



Многофункциональная водолечебная ванна "Неман" (320/250 л) с автоматической системой наклона лежа для удобного входа и выхода пациента предназначена для проведения стандартных бальнеологических процедур с применением пресной или слабо минерализованной воды. Ванна может быть дополнительно оснащена оборудованием для аэромассажа и хромотерапии.

Одной из особенностей ванны "Неман" является наполнение через термостатический смеситель, что позволяет задавать температуру воды с большой точностью.

Для изменения угла наклона лежа используется электрический привод. Для предупреждения аварийной ситуации, при которой исчезает электропитание в сети учреждения, ванна оснащается аккумуляторным блоком, позволяющим безопасно завершить процедуру.

Эргономичная форма лежа в виде шезлонга создает максимальный комфорт, т.к. в отличие от обычных ванн с «плоским дном» не дает возможности «соскальзывать вниз» человеку, создавая условия, при которых голова пациента всегда находится выше уровня воды, а также помогает входу и выходу из ванны при перемещении лежа в вертикальное положение.



Система аэромассажа, включает в себя 18 аэрофорсунок из нержавеющей стали, расположенных по дну ванны, каждая из которых имеет 7 пузырьковых отверстий. Данная опция позволяет проводить процедуру воздушно-пузырькового массажа.

Система хромотерапии WaterLight, включает в себя 14 светодиодов, встроенных по периметру всей ванны, и имеет 2 режима работы: режим плавного перехода света один в другой и режим монохромного излучения.

Эффекты применения:

В ваннах с аэромассажем «Неман» устанавливаются специальные форсунки, которые обеспечивают непрерывный поток воздушных пузырьков. Благодаря напору, воздушная струя разбивается на тысячи маленьких пузырьков, которые буквально окутывают тело и стимулируют работу нервных окончаний.

Такой массаж отлично снимает стресс и напряжение, улучшает кровоток и лимфоотток, восстанавливает душевное спокойствие. Отмечается положительное воздействие аэромассажа на кожу человека. Благодаря плотной струе воздушных пузырьков очищаются поры, происходит насыщение кожи кислородом. Аэромассаж - один из лучших способов вернуть и сохранить упругость кожи.



Создание воздушного облака вокруг тела позволяет снять нагрузку с костей и суставов, значительно снижает болевые ощущения любой этимологии - мышечные, суставные или психосоматические.

Положительно аэромассаж влияет на вегетативную и центральную нервную системы, помогает в борьбе с лишним весом, является отличным способом борьбы с бессонницей.

Специалисты медицинских центров рекомендуют во время процедур аэромассажа использовать аромамасла или соли. Воздушные потоки, создаваемые форсунками аэромассажа, значительно улучшают способность кожи воспринимать питательные элементы.

Так же, в отличие от гидромассажа, аэромассаж показан детям, людям с повышенным давлением и чувствительной кожей.

Применение в медицинской практике:

успешно применяется в санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях, оздоровительных комплексах, в центрах реабилитации инвалидов.


Неман

Технические характеристики	
Максимальный объем заливаемой воды, л	320
Полезный объем Ванны, л	250
Подключение горячей воды и холодной воды	труба 1/2"
Время наполнения ванны, мин * При давлении воды в подводящем трубопроводе 4,5 бар.	6±1
Время слива ванны, мин	3±1
Диаметр сливного отверстия, мм	50
Габаритные размеры ванны (ДхШхВ), мм	1720x1060x1270
Номинальное напряжение, В	220±10%
Масса ванны стандартной комплектации не более, кг Внимание: масса ванны может меняться в зависимости от комплектации	90
Потребляемая мощность: - модификация - бальнеологическая, Вт - модификация - аэромассажная, Вт - модификация - с системой Water Light, Вт - модификация - аэромассажная с системой Water Light, Вт - модификация - с краном подачи минеральной воды, Вт	не более 100 не более 800 не более 150 не более 850 не более 100

220012, (Belarus), . . . , 16, . 125

/ : +375 17 320 70 50, +375 17 320 99 43
/ : +375 29 695 70 50, +375 29 634 03 69

e-mail: darni-ls@bk.ru
e-mail: darnilux@bk.ru
e-mail: darnilux@mail.ru

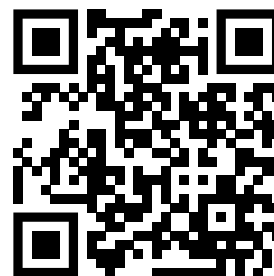

Информация каталога носит ознакомительный характер