

Physiotecnica

Системы
вытяжения
позвоночника
«АТЛАНТА»

197198, Санкт-Петербург,
ул. Съезжинская, д.23, пом. 2-Н
mail@pt-med.ru, +7 (812) 321 67 80
www.pt-med.ru

СИСТЕМЫ ВЫТЯЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА «АТЛАНТА»

Еще в 1966 году советским хирургом В. А. Лисуновым впервые был представлен метод подводного вытяжения, при котором больного укладывали на наклонный щит в ванну и фиксировали за верхнюю часть тела с помощью специального корсета, а груз крепили за поясничный корсет. Данная технология применялась для лечения дискогенных радикулитов и ряда других заболеваний позвоночника.



В 2015 году компанией Физиотехника был разработан современный комплекс оборудования «Атланта», включающий в себя подъемник с ложем с изменяемым углом наклона и ванны большого объема. Компания Физиотехника выпускает две модификации ванны – с электронным тяговым блоком, управляемым с цветного ЖК дисплея, и ванну с классическим тяговым устройством, где сила вытяжения создается с помощью рычага и прикрепленных к нему гирь. Ванны могут быть оснащены большим количеством различных опций по желанию покупателя.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА «АТЛАНТА»:

- ▶ возможность вытяжения трех зон позвоночника одновременно;
- ▶ вытяжение шейного и грудного отделов позвоночника;
- ▶ мобильность и удобство использования всех элементов комплекса как вместе, так и отдельно, для других бальнеологических процедур;
- ▶ комбинирование процедуры вытяжения с полноценными процедурами подводного душ-массажа;
- ▶ надежность и безопасность комплекса, т. к. он позволяет в случае плохого самочувствия быстро поднять и переместить пациента из ванны на автономном подъемнике;
- ▶ возможность перемещать пациента после процедуры непосредственно на кушетку для отдыха;
- ▶ проведение большего количества процедур за единицу времени, благодаря широкой линейке дополнительных опций;
- ▶ проведение процедур в минеральной воде;
- ▶ комплекс прост и удобен в обслуживании – нет труднодоступных мест для гигиенической обработки ванны.



Использование ванны «Атланта», как универсальной для процедур вытяжения позвоночника и процедур подводного душ массажа позволяет экономить место в медицинских учреждениях и повышает рентабельность оборудования.



Комплекс
физиотерапевтический
«Атланта»
с электронной системой
подводного горизонтального
вытяжения позвоночника





Комплекс физиотерапевтический «Атланта»

с электронной системой подводного
горизонтального вытяжения позвоночника

Габаритные размеры комплекса	2600×1010×1050 мм
Полезный объем	800 л
Масса	225 кг


Базовая комплектация:

- ▶ ванна прямоугольной формы «Атланта»;
- ▶ электронная система вытяжения позвоночника;
- ▶ электрический подъемник;
- ▶ комплект корсетов (бандажей);
- ▶ двухуровневая ступень;
- ▶ съемный подголовник




Особенности:

- ▶ система контроля тракционного усиления осуществляется за счет электронного блока управления. Программа позволяет запоминать и выполнять сложные последовательности натяжения, чередуемого с ослаблением, по заданным параметрам;
- ▶ в ванне можно проводить полноценные процедуры подводного душ-массажа пациентам любого роста и комплекции;
- ▶ за счет большой длины ложа и конструкции подголовника процедуры ПДМ можно комфортно проводить пациенту, лежащему в ванне на животе или спине;
- ▶ специально разработанный для проведения процедур подводного горизонтального вытяжения подъемник обеспечивает плавное погружение и комфортное размещение пациента в ванне;
- ▶ подъемник оснащен электрическим приводом и аккумуляторной батареей для автономной работы;
- ▶ подъемник может быть изготовлен полностью из нержавеющей стали (для ванн со слабоминерализованной водой);
- ▶ в качестве меры безопасности предусмотрена пневматическая груша. При ее нажатии, в случае плохого самочувствия, возможна экстренная остановка процедуры пациентом, на дисплее отображается соответствующая надпись.

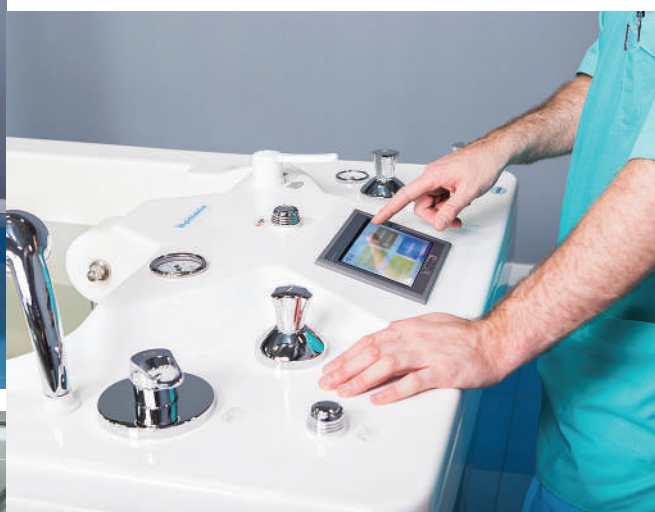

Комплекс
физиотерапевтический
«Атланта»
с механической системой
подводного горизонтального
вытяжения позвоночника



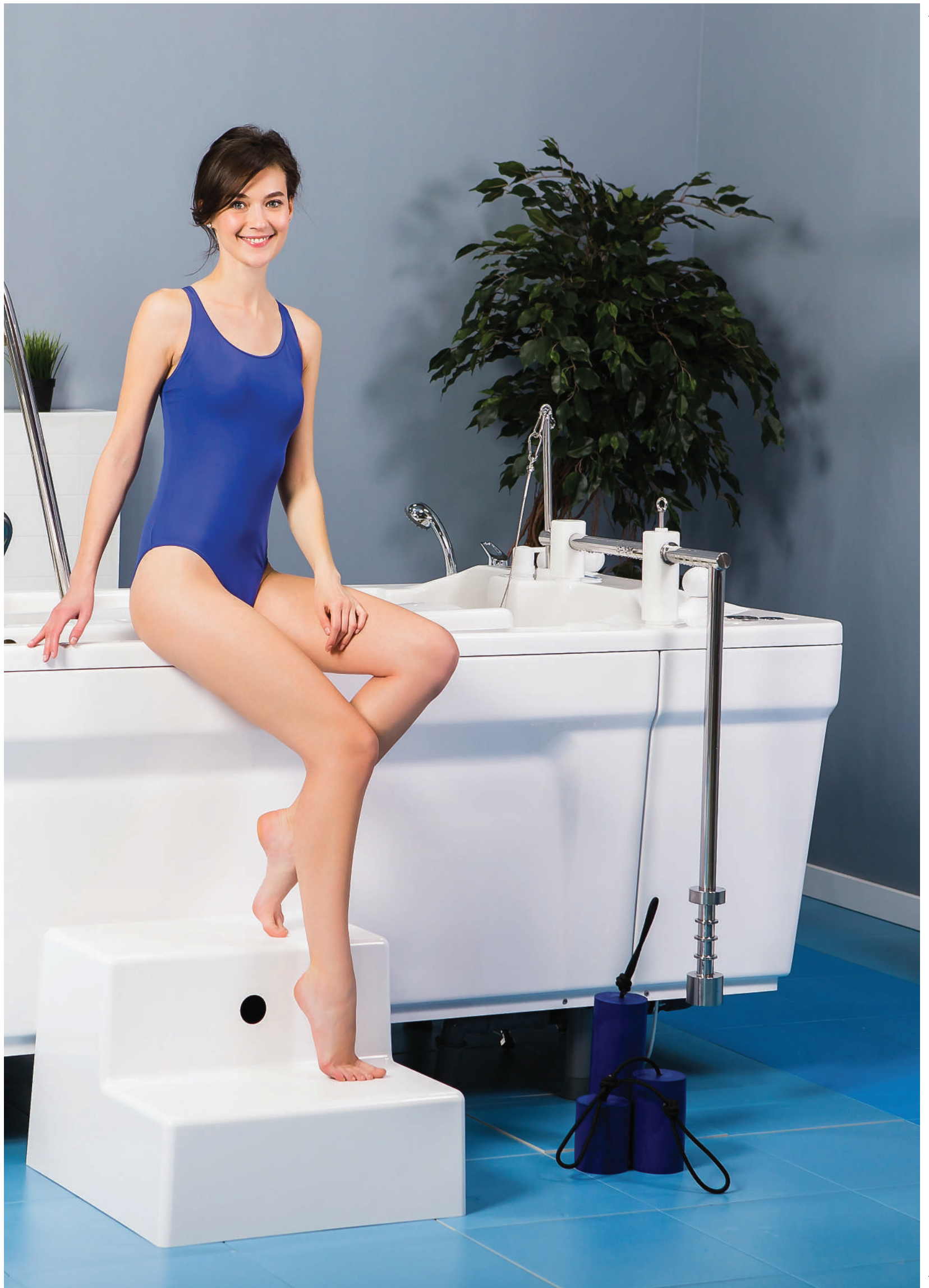


Комплекс физиотерапевтический «Атланта»

с механической системой подводного
горизонтального вытяжения позвоночника

Габаритные размеры комплекса	2600×1010×1150 мм
Полезный объем	800 л
Масса	150 кг

Базовая комплектация:

- ▶ ванна прямоугольной формы «Атланта»;
- ▶ механическая система вытяжения позвоночника (штанга с системой креплений для гирь, комплект гирь);
- ▶ электрический подъемник;
- ▶ комплект корсетов (бандажей);
- ▶ двухуровневая ступень;
- ▶ съемный подголовник.

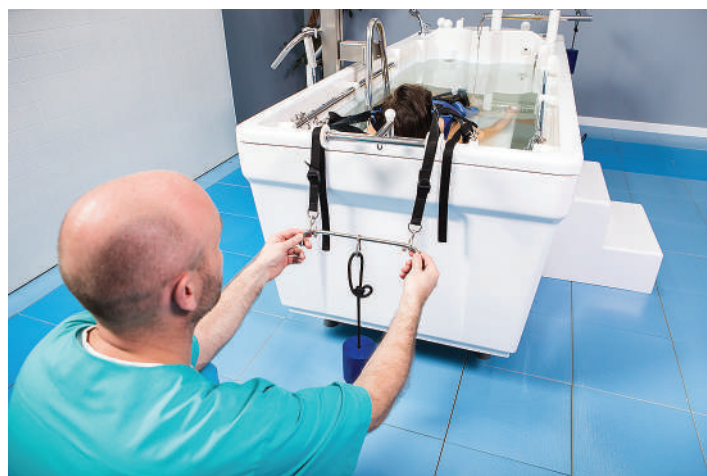

Особенности:

- ▶ многофункциональная, исключительно надежная, гидротерапевтическая установка по доступной цене;
- ▶ проведение процедур статического вытяжения с помощью системы рычагов и гирь;
- ▶ в ванне можно проводить полноценные процедуры подводного душ-массажа пациентам любого роста и комплекции;
- ▶ за счет большой длины ложа и конструкции подголовника процедуры ПДМ можно комфортно проводить пациенту, лежащему в ванне на животе или спине;
- ▶ специально разработанный для проведения процедур подводного горизонтального вытяжения подъемник обеспечивает плавное погружение и комфортное размещение пациента в ванне;
- ▶ подъемник оснащен электрическим приводом и аккумуляторной батареей для автономной работы;
- ▶ подъемник может быть изготовлен полностью из нержавеющей стали (для ванн со слабуминерализованной водой).






	Ванна Атланта с электронной системой вытяжения	Ванна Атланта с механической системой вытяжения
Ванна	2600×1010×1050	2600×1010×1150
Подъемник	Частично или полностью из нержавеющей стали	Частично или полностью из нержавеющей стали
Сила вытяжения на поясничный отдел	0–60	0–60
Сила вытяжения для шейного отдела	0–10	0–10
Возможность комбинированного вытяжения нескольких отделов с разным усилием	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Блок управления процедурой	Электронный ЖК дисплей с сенсорным экраном	Рычаг с гирями
Возможность проведения переменного вытяжения	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Возможность сохранять данные о процедуре в блоке управления	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Возможность аварийной остановки процедуры в случае плохого самочувствия пациентом	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Возможность проведения процедуры в ванне с минеральной водой	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Дополнительное оснащение шлангом для подводного душ-массажа	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Дополнительное оснащение системой аэро массажа	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Дополнительное оснащение системой хромотерапии	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Дополнительное оснащение системой быстрого слива воды	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

220012, (Belarus),, 16, . 125

/ : +375 17 320 70 50, +375 17 320 99 43
/ : +375 29 695 70 50, +375 29 634 03 69

e-mail: darni-ls@bk.ru
e-mail: darnilux@bk.ru
e-mail: darnilux@mail.ru

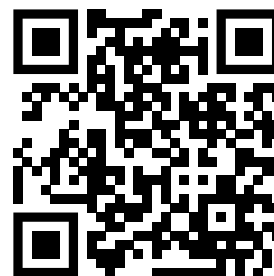

Информация каталога носит ознакомительный характер